

無線化ユニット接続方法

◆まず初めに

- ご準備いただくもの
 - ・表示端末
(Wi-Fi接続が可能なパソコン、タブレット、スマートフォン)
 - ・SRソフトビジョン数値版ワイヤレス
(SRソフトビジョン数値版+無線化ユニットのセット)

1. 無線化ユニットとSRソフトビジョン数値版の接続

「SRソフトビジョン数値版」に付属するUSBケーブルを使用し、「無線化ユニット」と接続します
無線化ユニット側の「USB1」「USB2」はどちらに挿入しても使用できます


2. 無線化ユニットの電源を入れる



①～③まで約30秒かかります


- ① ボタンを1秒間押します
- ② 起動中は「電源」「SDカード」がオレンジ色に点灯します
- ③ 起動が完了すると「電源」「機器接続中」が緑色に点灯します

3. 表示端末とWi-Fiを接続する～タブレット/スマートフォン～

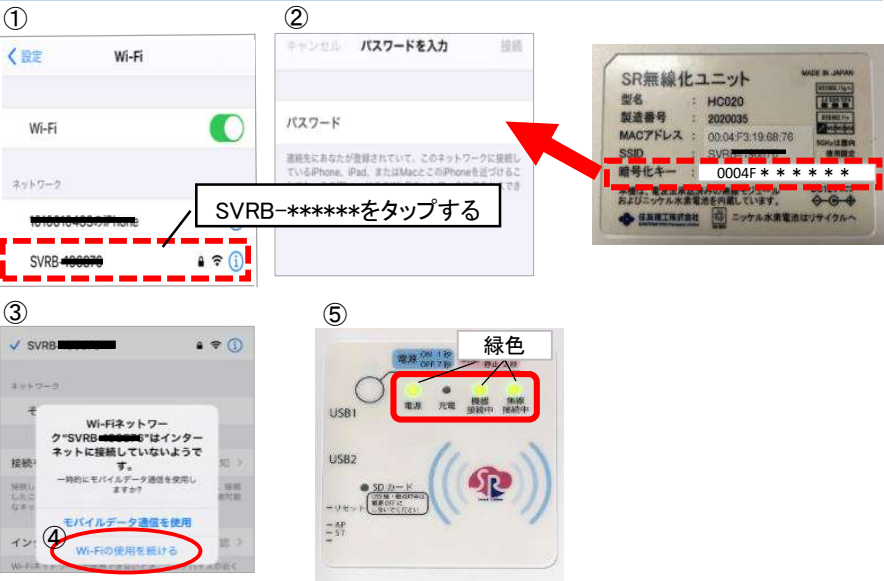

- ① タブレット/スマートフォンのWi-Fi設定画面より「SVRB-****」と表示されたSSIDをタップします
- ② パスワードを求められますので無線化ユニット裏面の「暗号化キー」を入力します
- ③ 接続完了すると左写真のように「インターネットに接続していないようです」と表示されます
- ④ 「Wi-Fiの使用を続ける」をタップする
- ⑤ 「電源」「機器接続中」「無線接続中」が緑色に点灯します

3. 表示端末とWi-Fiを接続する～パソコン～

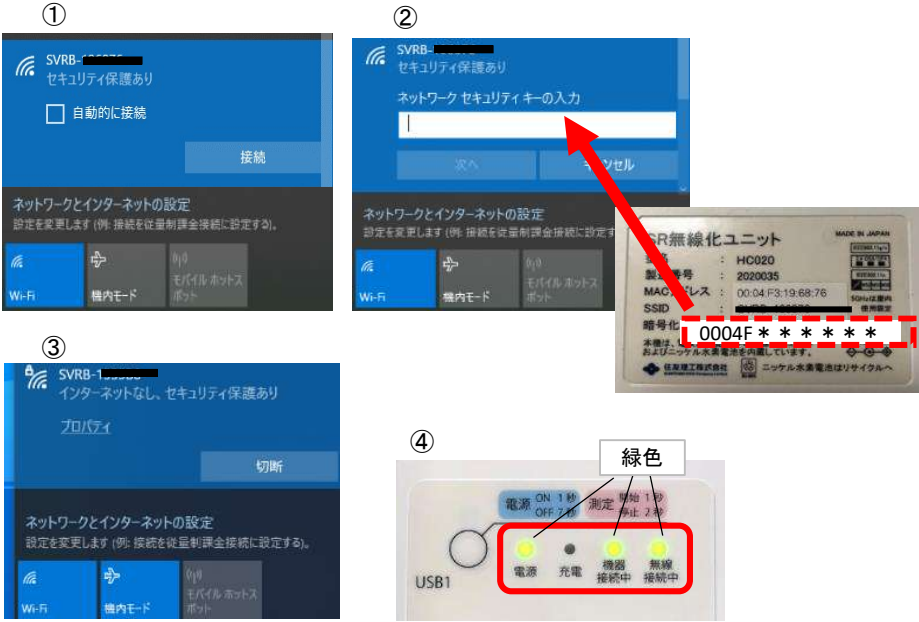

- ① パソコンの画面右下のWi-Fi設定画面を開き、「SVRB-****」と表示されたSSIDをクリックします
- ② パスワードを求められますので、無線化ユニット裏面の「暗号化キー」を入力します
- ③ 接続が完了すると「インターネットなし、セキュリティ保護あり」と表示されます
- ④ 「電源」「機器接続中」「無線接続中」が緑色に点灯します

※表示機器のOSや機種により画面が異なります

4. アプリケーションのトップ画面を表示する



- ① パソコン/スマートフォン/タブレットにある「Google Chrome」を立ち上げます
- ② URLを入力する欄に「http://192.168.10.1/」と入力します
- ③ 接続が完了すると右上写真の画面(TOPページ)が表示されます
※端末によってはモバイル通信(4G,5G)を優先し、無線化ユニットと接続できない場合があります
→「機内モード」に設定し、再度Wi-Fiを接続してください
- ④ SRソフトビジョン数値版の「開く」を選択します
- ⑤ 「LIVE」をタップすると圧分布が表示されます

時刻と日付設定

◆初めて本製品を使用すると、長期間使用しなかった場合には、時刻と日付を設定する必要があります

①トップ画面で「本体設定」を選択してください



- ② 無線化ユニット設定ページの「機器情報」→「無線化ユニット時間設定」に現在時刻を入力するか、ご利用中の端末時刻を反映させる場合は、「自動入力」ボタンを押してください
- ③ ページ上部の「Apply」ボタンを押して、設定を適用してください



お問い合わせ

■ お客様相談室 フコク物産株式会社 内 ■ 製造元 住友理工株式会社
電話: 03-3765-3228 E-mail: tri-health-contact@jp.sumitomoriko.com
E-mail: kikaku@fukoku-bussan.jp

ソフトウェア、取り扱い説明書はホームページからダウンロードできます

住友理工 ソフトビジョン

検索


使用方法(動画)やユーザーの声も掲載していま



使い方

圧力分布を表示する

①【**LIVE**】をタップする

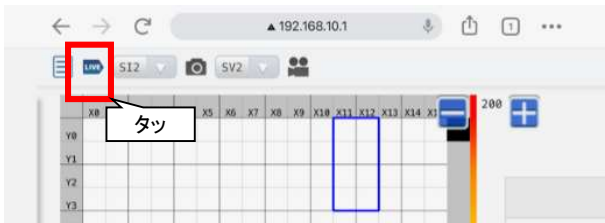

測定中の圧分布図が表示されます



静止画を保存する

①【**SI2**】から保存形式を選択する




ファイル形式	内容
静止画データ (*.si2)	アプリケーションオリジナルのファイル形式です。再度ファイルを開くことにより、表示方法やファイル形式を変更できます。
CSV ファイル (*.csv)	カンマ (,) で区切られたフォーマットのファイル形式です。アプリケーションで再生、編集することはできません。

②【**カメラ**】をタップする



③ファイル名を入力する

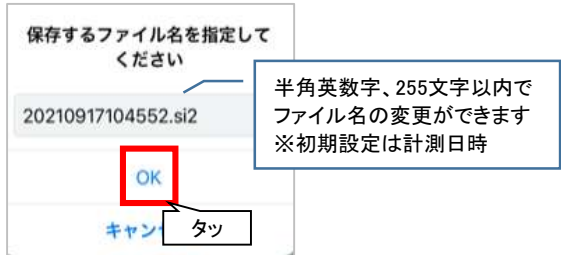

④【**OK**】をタップする

記録ファイルが保存されます


録画する

①【**SV2**】から保存形式を選択する




ファイル形式	内容
動画データ (*.sv2)	アプリケーションオリジナルのファイル形式です。再度ファイルを開くことにより、表示方法やファイル形式を変更できます。
CSV ファイル (*.csv)	カンマ (,) で区切られたフォーマットのファイル形式です。アプリケーションで再生、編集することはできません。


②【**録画**】をタップし、録画を開始する

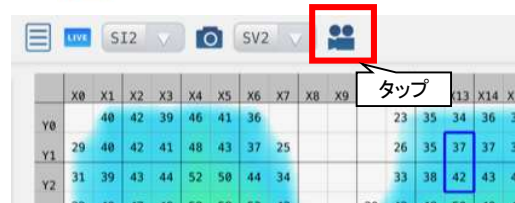

③【**停止**】をタップし、録画を停止する

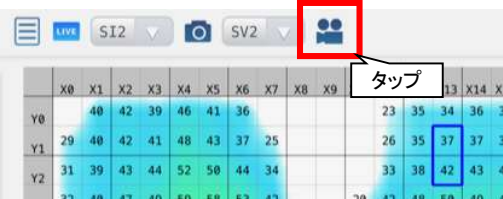

④ファイル名を入力する

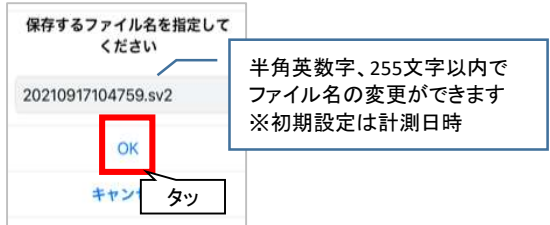


⑤【**OK**】をタップする

記録ファイルが保存されます

保存した静止画・動画を表示、再生する

①【**メニュー**】をタップする

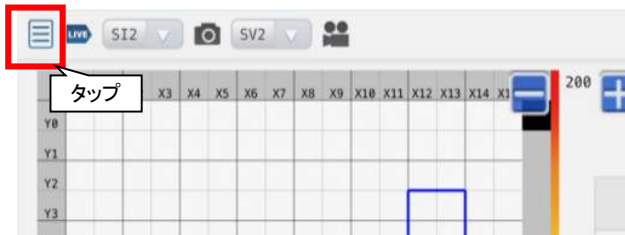

②【**ファイルを開く**】をタップする




③表示する静止画または動画を選択する



④【**1画面で開く**】をタップする




⑤選択した静止画または動画が表示される

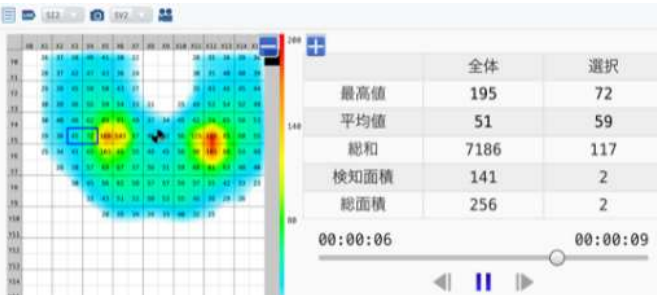

項目	内容
再生/停止	録画した圧力分布の変化を再生/停止します。
戻る/進む	停止中にタップすることで、コマ送りで動画をみることができます。
再生位置	録画した圧力分布の再生位置を表示します。

パソコンとの連携

■SDカードでのコピーまたは移動

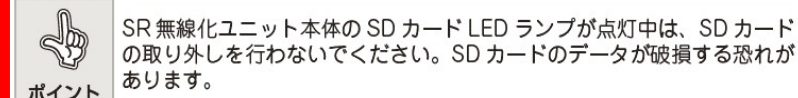

- ①SDカードを本体から取り出す
本体のサイドカバーを開けて、「カチッ」と音がするまでSDカードをゆっくりとまっすぐ押し込むとSDカードが取り出せます
- ②データのコピーまたは移動
お使いのパソコンやSDカードリーダーなどでデータをコピーまたは移動してください
- ③SDカードを本体に戻す
SDカードの裏表を間違えないよう、「カチッ」と音がするまでゆっくりとまっすぐ押し込んでください


■USBでのコピーまたは移動

①USBを無線化ユニット本体に差し込む

②【**メニュー**】をタップする



③【**TOP**】をタップし、TOP画面へ戻る

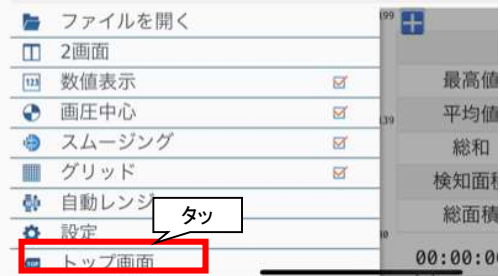

④【**ファイル移動**】をタップする



⑤【**SDカード**】欄から、USBへ移動させるデータを選択する



⑥【**USBへコピー**】または、【**USBへ移動**】をタップする
コピーまたは移動が完了する



拡大

