

SRソフトビジョン(半身版)クイックガイド

梱包一覧



動作環境

お使いになるパソコンは、下記の性能以上のものを推奨いたします。

- CPU : Intel® Core™2 Duo2.4GHz 相当以上
- Memory : 2GB 以上
- OS : Windows® 7 SP1
Windows® 8
Windows® 8.1
Windows® 10 (ビルド 10240)
※日本語版のみ
- Visual C++ : Visual C++ 2008 ランタイムが正常にインストールされ動作すること
2008 ランタイム
- .Net Framework: .Net Framework 2.0 または .Net Framework 4.0 が正常にインストールされ動作すること
- USB : USB2.0 インターフェース
- 画面解像度 : 1024 × 768 以上

全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

商標について

- Microsoft®, Windows®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Media Player は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe®, Adobe® Reader®, Flash Player は Adobe Systems Incorporated の米国および他の国における登録商標です。
- Intel®, Core™2 Duo は Intel Corporation の米国および他の国における登録商標です。
- Smart Rubber® は、住友理工株式会社の登録商標です。
- その他住友理工製品および関連資料等に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。


■ SRソフトビジョン(半身版)を安全にお使いいただくため、必ず取扱説明書をお読みください。

ビューワーソフトウェアのインストール

ビューワーソフトウェアをご使用になるためには、ビューワーソフトウェアのインストールが必要です。ここではビューワーソフトウェアのインストールの手順を説明します。

※ ビューワーソフトウェアのインストールの手順は、「Windows® 10」で説明しています。OSによって表示画面が異なる場合があります。お使いのOSの画面の指示にしたがってビューワーソフトウェアのインストールをおこなってください。

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 付属 CD-ROM をセットする

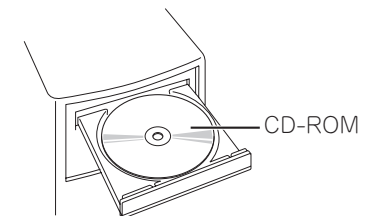

ポイント

- 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。
- しばらくすると画面が表示されます。
- OSによって、表示画面が異なる場合があります。画面の指示にしたがって操作してください。
- パソコンの環境によってウイルススキャンソフトなどによって正常にインストールができない場合があります。ウイルススキャンソフトなどを一時的に止めてインストールをおこなってください。
- インストールには管理者権限が必要です。
- ビューワーソフトウェアについては、下記のホームページからのダウンロードも可能です。
<https://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/download.html>
- ビューワーソフトウェアは仕様改良により、予告なく変更する場合があります。

- 3 最初に表示されるメニューの「インストール」をクリックする



その他のインストール手順については、取扱説明書をご確認ください。