



SR 無線化ユニット クイックガイド


本製品は別売りの「胸骨圧迫訓練評価システム しんのすけくん」または「SR ソフトビジョン（数値版）」と合わせてご使用いただける製品です。本製品を正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書をお読みください。

準備いただくもの

- しんのすけくん または SR ソフトビジョン（数値版）
- パソコン または スマホ または タブレットなどの表示端末

本体を充電する

1. AC アダプタの電源ケーブルコネクタに電源ケーブルのアダプタ側プラグを水平に差し込んでください
2. AC アダプタの本体側プラグを本体の AC アダプタ用コネクタに水平に差し込んでください
3. 電源コンセントの電源プラグを AC100V 電源コンセントに接続してください

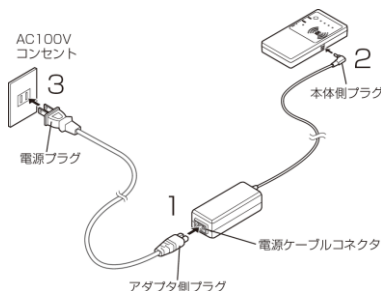

本体にアクセスする

1. 電源/計測ボタンを 1 秒以上押して電源を入れます。（本体の起動に約 30 秒かかります）電源 LED が緑色になっていることを確認してください。
2. 本体背面に記載された「SSID」と「暗号化キー」を使用して、ご使用の表示端末の Wi-Fi 設定（WLAN 設定）から本体に接続をしてください。
3. 表示端末の Google Chrome ブラウザから「<http://192.168.10.1/>」にアクセスしてください。
4. トップ画面でしんのすけくん または SR ソフトビジョン（数値版）を選択してください。

トップ画面

表示端末によってはメニューが [≡] と表示されている場合があります。この場合、[≡] をタップするとメニューが表示されます。

本体設定 ファイル移動 SDカード初期化 ライセンス

無線化ユニットにセンサを接続し、各製品ページへ移動してください。

しんのすけくん

開く ▶

SRソフトビジョン (数値版)

開く ▶

©2019 Sumitomo Life Company Limited. All Rights Reserved.

しんのすけくん画面を表示する場合にタップします

SRソフトビジョン（数値版）画面を表示する場合にタップします

| | |
|-----------|---|
| 本体設定 | SR 無線化ユニット本体の設定を行います。詳細は取扱説明書をご参照ください。 |
| ファイル移動 | SR 無線化ユニット本体の SD カードと USB 1,2 に接続した USB メモリとのデータファイルコピー、移動、削除を行います。 |
| SD カード初期化 | SR 無線化ユニット本体の SD カードを初期化します。初期化を行うと本体に保存されているデータが削除されます。 |
| ライセンス | SR 無線化ユニットで使用されている OSS(オープンソースソフトウェア) のライセンスが表示されます。 |

時計設定

本製品は時計機能を備えています。初めて本製品を使用する場合や内蔵電池が消費された場合は、時刻と日付を設定する必要があります。時計が設定されていないと、本製品機能に問題が生じるため、以下の手順に沿って設定してください。



1. トップ画面で「本体設定」を選択してください。



- 無線化ユニット設定ページの「機器情報」->「無線化ユニット時間設定」に現在時刻を入力するか、ご利用中の端末の時刻を反映させる場合は「自動入力」ボタンを押してください。
- ページ上部の「Apply」ボタンを押して、設定を適用してください。

アプリケーション使用方法

しんのすけくんやSRソフトビジョン（数値版）のアプリケーション使用方法につきましては、弊社ホームページをご参照ください。

住友理工株式会社 健康介護事業室ホームページ
<https://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/>

